

・ 楽起(らっきい)狭所用ベースマット すべり止め付き

このたびは楽起(らっきい)ベース用マットをご購入いただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよく読んで正しくご使用ください。この説明書は大切に保管してください。

- 用途：この製品は楽起(らっきい)ベース用マットです。用途以外の使用はしないでください。
- 特徴・表面は適度なまさつがありスリップしにくく安全に歩行できます。
・裏面は吸着性素材でベースに密着しめくれにくく安全に使用できます。



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は大切に保管してください。

⚠ 注 意

- このマットは自立式手すり「楽起」のベース用マットです。用途以外の使用はしないでください。
- 火気を近づけたり、ストーブやヒーターの近くで使用しないでください。
熱による製品の変質、変形や破損および火災の原因になります。
- 貼り付ける場合は裏面のフィルムをはがしてください。この時吸着面どうしがくっつかないように注意してください。
ベース板のほこりなどをふき取り位置を合わせて貼り付けてください。
- マットをベースに貼り付ける前に、裏面のフィルムが貼られている状態で丸いミシン目をはさみで切り取ってください。
すでにベースに支柱が取り付けられているものに貼り付ける場合は、丸いミシン目とその間の直線のミシン目を切り取って、支柱の上からかぶせるようにして貼り付けてください。その際、指などを怪我しないよう注意してください。
- 長期間貼り付けたままの状態にすると吸着面がはがれにくくなる場合があります。はがした時に吸着剤がベースに付着した場合はぬるま湯を含ませた布でふき取ってください。
- 濡れた足で使用しないでください。足が滑り転倒する恐れがあります。
- マットを貼り付ける時は全面を良く押さえて密着させて使用してください。密着不足の場合マットの縁がはがれたり浮き上がり、その部分につまずいて転倒する恐れがあります。すり足で歩行される方が使用の場合は特にご注意ください。
- ベースやマットの吸着面が濡れている場合は吸着しなくなる事があります。その時はしっかり乾かしてから使用してください。
- 殺虫剤などのスプレーをマットに向けて噴射しないでください。製品の変色や変質の恐れがあります。
- 裏面の吸着面どうしを合わせないでください。吸着面がくっつき、はなれなくなる事があります。
- 初めて使用される時にあそび毛が出る事がありますが時間の経過とともになくなります。
- マット表面が汚れた場合は固く絞った雑巾にて拭いてください。洗濯はできませんので汚れがひどい場合は買い替えて使用してください。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者又は、公的機関にご相談ください。

